

## Hilfreiche Tipps zur Kopplung der Hörgeräte mit dem iPhone

1. Laden Sie die **myPhonak App** aus dem **App Store** herunter.



2. Berühren Sie auf dem Startbildschirm des iPhones das Symbol für Einstellungen.
3. Tippen Sie in den **Einstellungen** auf das Bluetooth -Symbol.
4. Betätigen Sie die Schiebeschaltfläche neben „Bluetooth“, um Bluetooth einzuschalten.
5. Öffnen Sie beide Batterieladen für 5 Sekunden und schließen Sie sie, um die Hörgeräte wieder einzuschalten. Wenn Sie ein Hörgerät ohne ein Batteriefach haben, schalten Sie zunächst jedes Hörgerät aus, indem Sie den unteren Teil des Knopfes drücken, bis die LED **rot** (4 Sekunden) leuchtet. Schalten Sie dann jedes Hörgerät ein, indem Sie die gleiche Taste drücken, bis die LED **grün** (2 Sekunden) leuchtet.
6. Nach einigen Sekunden erscheint der Name der Hörgeräte auf dem iPhone Bildschirm. Tippen Sie es an, um es auszuwählen.
7. Folgende Nachrichten erscheinen: **Synchronisation von Kontakten** und **Favoriten erlauben?** Tippen Sie auf **Erlauben**.
8. Das gekoppelte Hörgerät gibt einen Verbindungston ab.

→ Das **iPhone** ist nun mit den Hörgeräten verbunden.

9. Öffnen Sie nun die App und folgen Sie den Anweisungen.