

Hilfreiche Tipps zur Kopplung der Remote Link mit dem iPhone

1. Laden Sie die **Remote Care App** von **Widex** aus dem **App Store** herunter.



2. Stellen Sie sicher, dass die **Remote Link** geladen ist.
3. Starten Sie die Remote Care App, klicken Sie auf **erste Schritte**.
4. Folgen Sie den Anweisungen in der App.
5. **Wichtig** ist, dass Sie zur Kopplung die Taste der Remote Link mind. 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die LED blau blinkt.
6. Das **iPhone** zeigt Ihnen die Remote Link in einem Fenster an. Tippen Sie in das Fenster, um die Kopplung abzuschließen.

→ Das **iPhone** ist nun mit der **Widex Remote Link** gekoppelt.

7. Die **Remote Care App** ist nun im vollen Umfang nutzbar.

